

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 01.06.2018 за № 602-123-201/25135



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для видалення іржі

Ця інструкція визначає умови застосування **засобу для видалення іржі** виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою якісного очищення інструментів різного роду від корозії на підприємствах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, в лікувальних установах різного профілю, підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Бланідас – Засіб для видалення іржі – готовий рідкий засіб для очищення інструментів різного роду від корозії, якісно видаляє застарілу іржу, біологічні забруднення, відкладення окису заліза. Забезпечує високоякісну роботу замкових частин інструментів. Можливість використання в ультразвукових ваннах. Багаторазове використання готового розчину.

Дозування: засіб готовий до застосування, використовується багаторазово. У випадку значного помутніння, випадання в осад та зміни кольору, засіб потрібно замінити.

Спосіб використання: необхідну кількість засобу налити в ємність, занурити інструментарій, витримати 30 хв. Сильне забруднення видалити за допомогою щітки, змоченої засобом. По закінченню експозиції виїняти інструменти та промити під проточною водою не менше 5 хв. При використанні засобу потрібно здійснювати візуальний контроль кожні 10 хв.

Склад: вода підготовлена, фосфорна кислота 5-15%

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують в канистру 5 л і 20 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.