



Інструкція
щодо застосування засобу
Білизна анти іржа (Bilysna anti corrosion)
(для інструментів)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Білизна анти іржа (Bilysna anti corrosion)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою якісного очищення хірургічних інструментів від корозії в лікувальних установах різного профілю та інших інструментів та поверхонь виготовлених з металу.

Загальні положення.

Білизна анти іржа (Bilysna anti corrosion) (для інструментів) – готовий рідкий миючий засіб для очищення металевих інструментів від корозії (хірургічні, манікюрні інструменти тощо) .

Склад засобу, мас. %: фосфорна кислота – 5, інгібітори корозії, стабілізатори, вода.

Білизна анти іржа (Bilysna anti corrosion) (для інструментів) – якісно видаляє застарілу іржу, біологічні забруднення, відкладення окису заліза. Забезпечує високоякісну роботу замкових частин інструментів. Можливість використання в ультразвукових ваннах. Багаторазове використання готового розчину.

Приготування робочого розчину засобу:

Засіб готовий до застосування, використовується багаторазово. У випадку значного помутніння, випадання в осад та зміни кольору, засіб потрібно замінити.

Спосіб використання: Необхідну кількість засобу налити в ємність, занурити інструментарій, витримати 30 хв. Сильне забруднення видалити за допомогою щітки, змоченої засобом. По закінченню експозиції вийняти інструменти та промити під проточною водою не менше 5 хв.

При використанні засобу потрібно здійснювати візуальний контроль кожні 10 хв.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в спеціальному одязі, захищати руки гумовими рукавичками, уникати попадання в очі та на шкіру. Використовувати тільки для інструментів з медичної сталі.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони з розпилювачем від 100 мл до 950 мл, у флакони 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів,17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 Е-mail: help@lysoform.ua